

PROTOCOLLI

MANUTENZIONE / DISINFEZIONE



CELLUM 6 ALLIANCE®



MICRO-TESTINE E MICRO-UGELLI



Per motivi igienici, la manutenzione delle testine di trattamento deve essere effettuata prima e dopo ogni utilizzo, disconnettendo le testine dal dispositivo, utilizzando salviette imbevute di una soluzione battericida e fungicida. Particolare attenzione deve essere prestata alla pulizia delle parti a contatto con il paziente.

ATTENZIONE

Utilizzare una soluzione disinfettante contenente il principio attivo ortoftalaldeide (OPA). Prima di utilizzare la soluzione disinfettante, si consiglia di leggere e seguire le raccomandazioni, le controindicazioni e le avvertenze relative a questo prodotto. Consultare le istruzioni per l'uso della soluzione. Tutte le procedure descritte in questa parte devono essere eseguite con l'apparecchio spento; cavi di alimentazione scollegati. Vietati i prodotti aggressivi come acetone, tricloroetilene o alcool a 90°, nonché spugne abrasive.

MICRO-TESTINE E MICRO-UGELLI

■ M A N U T E N Z I O N E

1. Scollegare la micro-testina o il micro-ugello dal relativo alloggiamento per l'operazione di pulizia.
2. Rimuovere i rulli dalle testine usando lo strumento di smontaggio fornito (fig.1-2).
3. Strofinare meticolosamente per almeno 1 minuto i rulli, il giunto, la camera di trattamento, le micro-testine, lo strumento di smontaggio e i micro-ugelli utilizzando salviette LPG® impregnate di una soluzione battericida e fungicida (fig.3).



Fig 1



Fig 2



Fig 3

4. Riaggianciare i rulli e verificare che ruotino liberamente.
5. Per i micro-ugelli, utilizzare cotone idrofilo impregnato con la stessa soluzione.
6. Conservare le testine nel cassetto precedentemente deterso con salviette LPG®.


■ D I S I N F E Z I O N E D E L L E M I C R O - T E S T I N E :

A differenza de manipoli di trattamento motorizzati (manipolo Alliance 80, Alliance 50 e TR30) che devono essere utilizzati con la tuta Endermowear™, le testine di trattamento non motorizzate (micro-ugelli e micro-testine) possono essere utilizzate direttamente sulla pelle per un uso specifico.

In questo caso, la disinfezione delle testine dopo ogni utilizzo è indispensabile:


1. Eseguire la procedura di pulizia descritta sopra.
2. Immergere le micro-testine, lo strumento di smontaggio e i micro-ugelli in una soluzione disinfettante per 12 minuti a 20°C seguendo le raccomandazioni sulla confezione del prodotto disinfettante.
3. Sciacquare a fondo le testine di trattamento e lo strumento di smontaggio con acqua sterile o potabile per almeno 1 minuto utilizzando un grande volume di acqua (circa 8 litri di acqua). Ripetere l'operazione altre 2 volte, per un totale di 3 risciacqui.
4. Asciugare gli elementi.
5. Posizionare le testine nel cassetto precedentemente pulito utilizzando le salviette LPG®.

MANIPOLO ALLIANCE 80

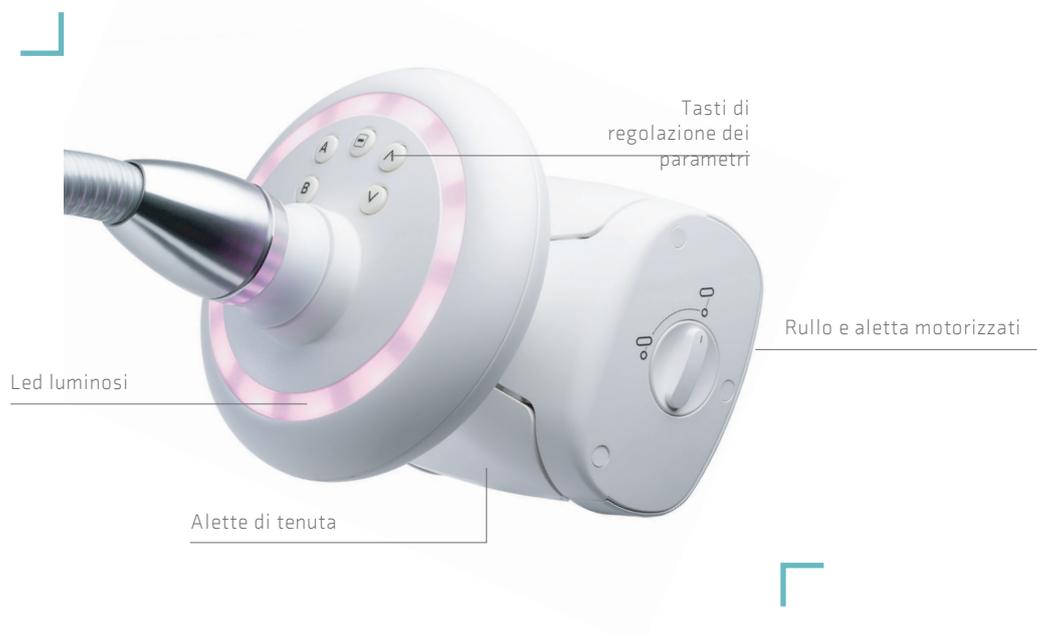

MANUTENZIONE

1. Rimuovere le alette di tenuta (2 alette in alto e 1 aletta in basso) come mostrato nelle foto seguenti (fig.1-4).

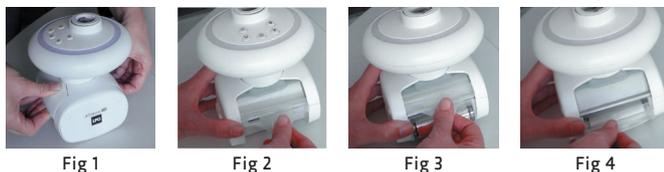

2. Strofinare meticolosamente per almeno 1 minuto usando salviette LPG® impregnate di una soluzione battericida e fungicida:
 - a. le alette di tenuta e il loro alloggiamento (fig 5-7)
 - b. entrambi i lati dei rulli (girare il manipolo, ruotare i rulli manualmente per accedere all'intera superficie) (fig.8)
 - c. l'aletta motorizzata (senza mobilitarla) (fig.9-10)
 - d. il manipolo




3. Rimontare le alette di tenuta.
4. Conservare il manipolo nel cassetto precedentemente deterso con salviette LPG®.

MANIPOLO ALLIANCE 50



MANUTENZIONE

1. Rimuovere le alette di tenuta (2 alette in alto e 1 aletta in basso) come mostrato nelle foto seguenti (fig 1-4).

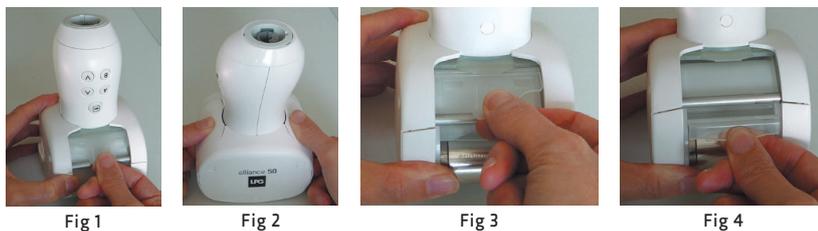

2. Strofinare meticolosamente per almeno 1 minuto usando salviette LPG® impregnate di una soluzione battericida e fungicida:
 - a. le alette di tenuta e il loro alloggiamento (fig 5-7)
 - b. entrambi i lati dei rulli (girare il manipolo, ruotare i rulli manualmente per accedere all'intera superficie) (fig.8)
 - c. l'aletta motorizzata (senza mobilitarla) (fig.9-10)
 - d. il manipolo



3. Rimontare le alette di tenuta.
4. Conservare il manipolo nel cassetto precedentemente deterso con salviette LPG®.

MANIPOLO TR30



MANUTENZIONE

1. Rimuovere le alette di tenuta come indicato nelle foto qua sotto (fig 1). Ripetere l'operazione sulla 2^a aletta.
2. Strofinare meticolosamente per almeno 1 minuto con l'aiuto delle salviette LPG® impregnate di una soluzione battericida e fungicida:
 - a. le alette e il loro alloggiamento (fig.2-3).
 - b. entrambi i lati dei rulli (girare il manipolo, ruotare i rulli manualmente per accedere all'intera superficie) (fig.4)
 - c. il manipolo.



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

3. Rimontare le alette di tenuta.
4. Conservare il manipolo nel cassetto precedentemente deterso con salviette LPG®.

TESTINA ERGOLIFT E CAMERE ERGOLIFT

■ M A N U T E N Z I O N E

Per motivi igienici, il manipolo Ergolift deve essere deterso prima e dopo ogni utilizzo, scollegando il manipolo dal dispositivo, utilizzando salviette LPG® impregnate con una soluzione battericida e fungicida. Particolare attenzione deve essere prestata alla pulizia delle parti a contatto con il paziente.

1. Scollegare la camera Ergolift dalla testina Ergolift (fig.1).



Fig 1




Strumento di smontaggio

2. Estrarre le alette con l'aiuto dello strumento di smontaggio previsto a questo scopo (fig.2).



Fig 2

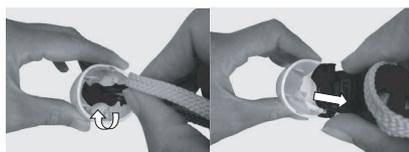

Rotazione di 90°

3. Strofinare meticolosamente la camera Ergolift, l'aletta e lo strumento di smontaggio per almeno 1 minuto con le salviette, come descritto qua sotto (fig.3).


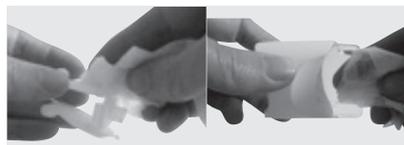


Fig 3

4. Rimontare le alette nella camera Ergolift con l'aiuto dello strumento di smontaggio seguendo l'operazione inversa (fig.4).



Fig 4

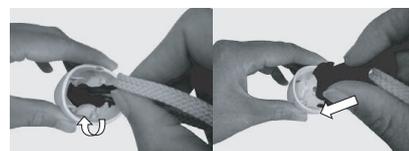

Rotazione di 90°

MANIPOLO ERGOLIFT E CAMERE ERGOLIFT

■ DISINFEZIONE DELLE CAMERE ERGOLIFT

Il manipolo Ergolift è concepito per essere utilizzato direttamente sulla pelle. Nel contesto di applicazioni specifiche, la disinfezione è essenziale dopo ogni utilizzo.

1. Eseguire la procedura di pulizia descritta sopra.
2. Immergere l'aletta e la camera Ergolift in una soluzione disinfettante per 12 minuti a 20°C secondo le raccomandazioni sulla confezione del prodotto disinfettante.
3. Sciacquare a fondo l'aletta e la camera Ergolift con acqua sterile o potabile per almeno un minuto utilizzando un grande volume di acqua (circa 8 litri di acqua). Ripetere l'operazione altre 2 volte, per un totale di 3 risciacqui.
4. Asciugare la camera Ergolift e l'aletta.
5. Posizionare la camera Ergolift e la protezione sul supporto accessorio precedentemente pulito con salviette disinfettanti.

ENDERMOWEAR™



La tuta Endermowear™, disponibile in diverse taglie per uomo e donna, è un capo appositamente studiato per il trattamento del corpo. È inteso per uso personale, garantisce una perfetta igiene e le sue aree opache proteggono le parti intime del paziente durante il trattamento. La composizione unica della tuta Endermowear™ garantisce un'eccellente adesione alla pelle per facilitare il movimento del manipolo di trattamento.



La tuta viene consegnata in una trousse che il cliente può personalizzare indicando il proprio nome sull'etichetta fornita a tale scopo. Diventa quindi proprietà del cliente e può essere utilizzata per più sedute. Per motivi igienici ed estetici, si consiglia di lavarla dopo ogni utilizzo. Per questo, fare riferimento alle istruzioni di lavaggio indicate sull'etichetta del kit.

P R O T O C O L L I

M A N U T E N Z I O N E / D I S I N F E Z I O N E



Cellu M6[®] Integral



MANIPOLI LIFT (NON MOTORIZZATI)

■ MANUTENZIONE DEI MANIPOLI LIFT:

1. Dopo ogni utilizzo, rimuovere l'aletta dal manipolo usando lo strumento fornito.
2. Pulire accuratamente le flange trasparenti, l'aletta e lo strumento di smontaggio per almeno 1 minuto con salviette LPG® (= Prodene Klint D51 impregnato con una soluzione battericida e fungicida).
3. Al termine della pulizia, riposizionare l'aletta spingendola nella sua sede utilizzando lo strumento di smontaggio.
4. Conservare il manipolo nel cassetto precedentemente deterso con salviette LPG®.



■ DISINFEZIONE DEI MANIPOLI LIFT:

1. Eseguire la procedura di pulizia descritta sopra.
2. Immergere l'aletta e lo strumento di smontaggio in una soluzione di Cidex OPA per 12 minuti a 20°C, seguendo le raccomandazioni riportate sulla confezione del prodotto Cidex OPA.
3. Sciacquare a fondo l'aletta e lo strumento di smontaggio con acqua sterile o potabile per almeno 1 minuto utilizzando un grande volume di acqua (circa 8 litri di acqua). Ripetere l'operazione altre 2 volte, per un totale di 3 risciacqui.
4. Asciugare l'aletta e lo strumento di smontaggio.
5. Una volta completata la disinfezione, riposizionare l'aletta spingendola nella sua sede, tenendola con la salvietta imbevuta di disinfettante o utilizzando lo strumento di smontaggio.
6. Posizionare i manipoli nel cassetto precedentemente deterso utilizzando le salviette LPG®.

MANIPOLI AUSILIARI TR15 ET TR30



TR30



TR15

■ MANUTENZIONE DEI MANIPOLI AUSILIARI:

1. Rimuovere i due rulli e il giunto.
2. Pulire a fondo i rulli, il giunto e le calotte inferiori per almeno 1 minuto utilizzando salviette LPG® (= salviette Prodene Klint D51 impregnate con una soluzione battericida e fungicida).
3. Riposizionare i rulli e verificare che ruotino liberamente.
4. Conservare il manipolo nel cassetto precedentemente deterso con salviette LPG®.

■ DISINFEZIONE DEI MANIPOLI AUSILIARI:

1. Eseguire la procedura di pulizia descritta sopra.
2. Immergere i rulli e il giunto in una soluzione di Cidex OPA per 12 minuti a 20°C, seguendo le raccomandazioni riportate sulla confezione del prodotto Cidex OPA.
3. Sciacquare a fondo i rulli e il giunto con acqua sterile o potabile per almeno 1 minuto utilizzando un grande volume di acqua (circa 8 litri di acqua). Ripetere l'operazione altre 2 volte, per un totale di 3 risciacqui.
4. Asciugare i rulli e il giunto.
5. Riagganciare i rulli e verificare che ruotino liberamente.
6. Posizionare i manipoli nel cassetto precedentemente deterso utilizzando le salviette LPG®.

MICRO-UGELLI E MICRO-TESTINE



■ MANUTENZIONE DELLE TESTINE E DEGLI UGELLI:

1. Rimuovere i rulli dalle testine con l'aiuto dello strumento di smontaggio previsto.
2. Pulire meticolosamente per almeno 1 minuto i rulli, le micro-testine, lo strumento di smontaggio e i micro-ugelli utilizzando salviette LPG® (= salviette Prodene Klint D51 impregnate con una soluzione battericida e fungicida).
3. Conservare il manipolo nel cassetto precedentemente deterso con salviette LPG®.

■ DISINFEZIONE DELLE TESTINE E DEGLI UGELLI:

1. Eseguire la procedura di pulizia descritta sopra.
2. Immergere i rulli, le micro-testine, lo strumento di smontaggio e i micro-ugelli in una soluzione di Cidex OPA per 12 minuti a 20°C, seguendo le raccomandazioni riportate sulla confezione del prodotto Cidex OPA.
3. Sciacquare a fondo con acqua sterile o potabile per almeno 1 minuto utilizzando un grande volume di acqua (circa 8 litri di acqua). Ripetere l'operazione altre 2 volte, per un totale di 3 risciacqui.
4. Asciugare i rulli, le micro-testine, lo strumento di smontaggio e i micro-ugelli.
5. Posizionare i manipoli nel cassetto precedentemente deterso utilizzando le salviette LPG®.

MANIPOLO TR50



■ M A N U T E N Z I O N E D E L T R 5 0 :

1. Rimuovere le alette di protezione.
2. Pulire meticolosamente per almeno 1 minuto utilizzando salviette LPG® (= salviette Prodene Klint D51 impregnate con una soluzione battericida e fungicida).
 - a. le alette così come il loro alloggiamento e i rulli su tutta la loro superficie (girando il manipolo e facendo girare i rulli manualmente per accedere a tutta la superficie)
 - b. il manipolo
3. Rimontare le alette di protezione.
4. Posizionare il manipolo nel cassetto precedentemente deterso utilizzando le salviette LPG®.

MANIPOLO ERGODRIVE



MANIPOLO ERGODRIVE



KEYMODULE

■ MANUTENZIONE DEL MANIPOLO ERGODRIVE :


Manutenzione delle coperture di protezione :

1. Liberare il Keymodule e smontare le alette di protezione.
2. Pulire meticolosamente le alette e il loro alloggiamento per almeno 1 minuto utilizzando salviette LPG® (= salviette Prodene Klint D51 impregnate con una soluzione battericida e fungicida).

Manutenzione del Keymodule :

1. Girare il Keymodule e pulire meticolosamente per almeno 1 minuto utilizzando salviette LPG® (= salviette Prodene Klint D51 impregnate con una soluzione battericida e fungicida) le parti seguenti:
 - a. i rulli (far girare i rulli manualmente per accedere a tutta la superficie)
 - b. il giunto di protezione fra il Keymodule e il corpo del manipolo
 - c. le calotte in plastica del Keymodule
2. Rimontare le alette di protezione.
3. Verificare che i contatti siano ben puliti e asciutti prima di procedere al rimontaggio del Keymodule sul manipolo principale.
4. Posizionare il manipolo nel cassetto precedentemente deterso utilizzando le salviette LPG®.

TESTINA ERGOLIFT

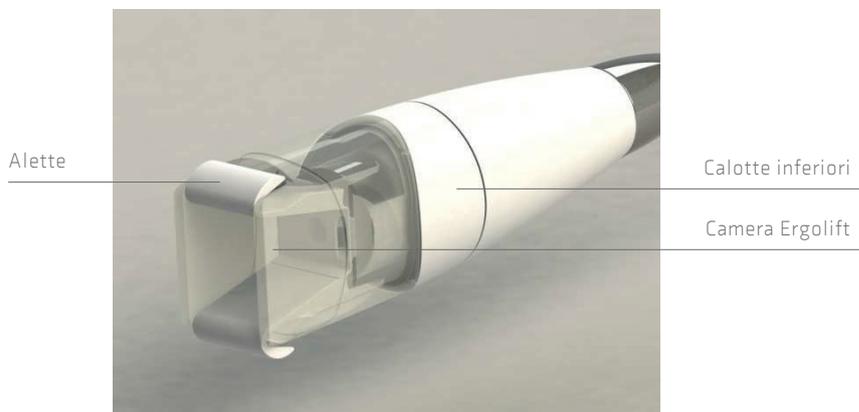

■ MANUTENZIONE DELLA TESTINA ERGOLIFT:

1. Smontare l'aletta e le camere Ergolift.
2. Pulire meticolosamente le camere Ergolift trasparenti, l'aletta e la calotta inferiore per almeno 1 minuto utilizzando salviette LPG® (= salviette Prodene Klint D51 impregnate con una soluzione battericida e fungicida).

■ DISINFEZIONE DELLA TESTINA ERGOLIFT:

1. Eseguire la procedura di pulizia descritta sopra.
2. Immergere le alette e le camere Ergolift in una soluzione di Cidex OPA per 12 minuti a 20°C, seguendo le raccomandazioni riportate sulla confezione del prodotto Cidex OPA.
3. Sciacquare a fondo con acqua sterile o potabile per almeno 1 minuto le camere Ergolift e le alette utilizzando un grande volume di acqua (circa 8 litri di acqua). Ripetere l'operazione altre 2 volte, per un totale di 3 risciacqui.
4. Asciugare le camere Ergolift e le alette.

ENDERMOWEAR™



La tuta Endermowear™, disponibile in diverse taglie per uomo e donna, è un capo appositamente studiato per il trattamento del corpo. È inteso per uso personale, garantisce una perfetta igiene e le sue aree opache proteggono le parti intime del paziente durante il trattamento. La composizione unica della tuta Endermowear™ garantisce un'eccellente adesione alla pelle per facilitare il movimento del manipolo di trattamento.

La tuta viene consegnata in una trousse che il cliente può personalizzare indicando il proprio nome sull'etichetta fornita a tale scopo. Diventa quindi proprietà del cliente e può essere utilizzata per più sedute. Per motivi igienici ed estetici, si consiglia di lavarla dopo ogni utilizzo. Per questo, fare riferimento alle istruzioni di lavaggio indicate sull'etichetta del kit.