NUOVA WEB APP LPG®

Necessaria per Certificazione Industria 4.0

DOCUMENTO IMPORTANTE



NUOVA WEB APP LPG – INDUSTRIA 4.0

LPG lancia la nuova applicazione WEB

- Utilità:
 - ✓ Necessaria per la Certificazione Industria 4.0
 - ✓ Valido supporto per visualizzare i dati sull'uso dell'apparecchiatura. La WEB APP verrà arricchita con ulteriori informazioni a stretto giro. Per il momento le funzionalità sono «necessarie e sufficienti» per il rispetto del criterio «Interconnessione» relativo ai Beni 4.0
- Accedere alla WEB APP è semplicissimo:
 - ✓ Accedi alla pagina internet <u>https://portal.lpgsystems.com/support/home</u> e segui le istruzioni che seguono.

In fase di Certificazione dell'apparecchiatura la società IMQ verificherà la funzionalità di tale app.



ACCESSO WEB APP

- Accesso da pc connesso a Internet
- Le credenziali per effettuare l'accesso sono quelle utilizzate per l'accesso alla propria apparecchiatura LPG



UTILIZZO WEB APP

- **ATTENZIONE:** l'apparecchiatura e il tablet dovranno essere accesi e in connessione tra loro.
- La schermata «Home» per il momento risulterà vuota.
- Cliccare sul menù «Industria 4.0».





1. Effettuato l'accesso nella sezione «Industria 4.0» della WEB APP verrà visualizzata la vostra apparecchiatura LPG in status «**free**»

≡	lPG						2 0 (
*	Alessandro						
							Ø
۵	SN		Allia Cellu	ance J M6 Alliance Premium (free	Start treatmen	t
	Serial Number Select machine ALL1H0100002	•					
							ø
	Treatments receiv	ed					
	Machine	Date	Duration session	Duration treatment	Treatments received	Client	
	Alliance	07/04/2021	6 minutes	1 minute	 Beauty.WomanBody.Areas.Stomach.Soft Beauty.WomanBody.Areas.BackThighs.Soft 	17 (3d7238e3)	
	Alliance	07/04/2021	0 minute	0 minute		()	

 All'arrivo della cliente <u>la receptionist</u>, dopo averla fatta accomodare in cabina, clicca sul pulsante «**Start Treatment**»



Per sicurezza, verifica al primo accesso che il numero di serie indicato nella WEB APP sia corretto, controllando il numero stesso sul retro dell'apparecchiatura.



Dopo aver cliccato su **«Start treatment»** lo status cambia in **«Treatment in progress»** e il riquadro sulla destra diventa **ROSSO** per indicare che l'apparecchiatura è occupata /

=	PG							<u>20</u> (I)
*	Ale	essandro etry 4.0)					
k								8
٢		SN		Alli Cell	iance lu M6 Alliance Premium (free	Start treatme	ent
		Serial Nu Select machin ALL1H010	imber 10002 👻					
		Treatments	received				/	2
		= L	PG					2 0 (
		*	Alessandro					
		Les 1						Ø
		٢	SN		Allia Cellu	nce M6 Alliance Premium (Treatment in progress	Ind treatment
			Serial Number Select machine ALL1H0100002	*				
								ø
			Treatments receive	ed				
			Machine	Date	Duration session	Duration treatment	Treatments received	Client
			Alliance	07/04/2021	6 minutes	1 minute	 Beauty.WomanBody.Areas.Stomach.Soft Beauty.WomanBody.Areas.BackThighs.Soft 	17 (3d7238e3)
			Alliance	07/04/2021	0 minute	0 minute		0





tasto «refresh»

- L'operatrice in cabina al termine del trattamento chiude la sessione.
- In reception per verificare se il trattamento in cabina è concluso basterà cliccare sul tasto «refresh» della Web App e si potrà visualizzare il cambio di status.

≡	LPG		ل ە ھ
*	Alessandro		
			B
۵	SN	Alliance Cellu M6 Alliance Premium I Treatment in progress	Ind treatment
	Serial Number Select machine ALL1H0100002		

Lo status «free» sarà visibile sulla Web App e il riquadro sulla destra ridiventa di colore BLU,



mentre **sull'apparecchiatura** ricomparirà il punto **VERDE** ad indicare che la stessa è ora disponibile per una nuova seduta.

	Cellu M6° alliance	
endermologie	16:01	
=		

ATTENZIONE: la chiusura di una sessione può essere effettuata solo da parte dell'operatrice di cabina.

Nella stessa pagina si potranno visualizzare tutte le sessioni svolte con i seguenti dati:

- Data
- Durata
- Trattamento effettuato
- ID cliente (lo stesso ID Cliente es. «ID7» si può verificare anche su Tablet LPG per identificare i riferimenti Nome / Cognome etc...del cliente





Dalla Web App <u>è possibile visualizzare anche i contatori dell'apparecchiatura</u>. Cliccare nel menù su «support --> equipments» Si aprirà la schermata seguente

= LPG		ک و ب	
Welcome	Equipments manager		
Alessandro		e Clicc	are sull'icona 🥨
Home Industria 4.0	Part Nu Serial N Type Status Version Assign Country T	rade Leasing Last Mo	
Support	Part Serial Number Number Status Version AssignmentCountry T	Leasing Last rade Expiration Modification Date Date	
Equipments User Equipments	□ 10221570ALL1H01(Alliance Ok 3.2.1 ★AlessandrIT S	None 22/03/202 11:49	
	Items per page: 5	1 – 1 of 1 < < > >	



Si aprirà la schermata seguente

Welcome Equipment card Alessandro Home Industria 4.0 Support Equipments Users Users User Alessandro User Alessandro Idex User Alessandro Hile Expiration Date Customer Alessandro HME User Alessandro HME Expiration Date Customer Alessandro HME Expiration Date None (DD/MM/YYY)< https://pi.ales.org/pi.ale	≡ LPG					1 0 (
 Home Industria 4.0 Support Equipments Users Leasing Configuration 	Welcome Alessandro	Equipme	ent card		P Back	Edit
Image: Non-State SN ALL1H0100002 Branding Name Cellu M6 Alliance Premium Status Ok Branding PN 0102297900 Image: Cellu M6 Alliance Premium Users Version 3.2.1 Modification 22/03/2021 11:49 (0D/MM/YYYY hhrmm) Date Users Customer Alessandro Activation Image: Cellu M6 Alliance Premium Medification User Alessandro Activation Image: Cellu M6 Alliance Premium Medification 22/03/2021 11:49 (0D/MM/YYYY hhrmm) Medification Donwload File Donwload Image: Cellu M6 Alliance Premium Medification Image: Cellu M6 Alliance Premium Medification User Alessandro Activation Image: Cellu M6 Alliance Premium Image: Cellu M6 Alliance Premium Medification User Alessandro Donwload Image: Cellu M6 Alliance Premium Image: Cellu M6 Alliance Premium Medification Leasing Configuration E Donwload Image: Cellu M6 Alliance Premium Image: Cellu M6 Alliance Premium Image: Cellu M6 Alliance Premium Leasing Configuration E Image: Cellu M6 Alliance Premium Image: Cellu M6 Alliance Premium Image: Ce	A Home	Machine				
Customer Alessandro Activation Image: Customer Alessandro Alessandro User Alessandro Donwload Image: Customer Alessandro Image: Customer Alessandro Image: User Alessandro Alessandro Image: Customer Alessandro Imag	 Support Equipments 	SN Status Version	ALL1H0100002 Ok 3.2.1	Branding Name Branding PN Modification Date	Cellu M6 Alliance Premium 0102297900 22/03/2021 11:49 (DD/MM/YYYY hh:mm)	= LPC
Leasing Configuration	Users	Customer User	Alessandro Alessandro alessandro.depedys@lpgitalia.com	Activation File Donwload HMI File Expiration Date	DD/MM/YYYY)	Alessandro 🏕 Home 🖿 Industr Suppor
		Leasing C	onfiguration			Equip Users

Scorrendo la pagina verso il basso si potranno visualizzare i contatori dell'apparecchiatura e dei manipoli

			ا 🕹 🕹	
	Leasing Configu	rration	ţ	
a 4.0	Leasing Mode : No	,		
ents	Counters		0:0	
/	Alliance80 Usage	32 hours 50 minutes		
	Alliance50 Usage	2 hours 59 minutes		
	Ergolift Usage	32 hours 19 minutes		
	Treatment Usage	i 359 hours 23 minutes		
	TR30 Usage	3 hours 23 minutes		
				1

1



TEST CHE VERRA' ESEGUITO IN FASE DI CERTIFICAZIONE

Durante la fase di test da parte della società che effettuerà la certificazione, si simulerà il seguente processo



- 4. L'operatrice in cabina vedrà il puntino Rosso sul video dell'apparecchiatura
- 5. Potrà procedere al trattamento
- 6. Una volta terminato chiuderà la sessione trattamento





La receptionist, cliccando sul tasto **«refresh»,** verificherà se il trattamento in cabina si è concluso. In caso affermativo lo status apparecchiatura ritornerà in «free» e il bottone sulla destra della WEB APP ritornerà di colore **BLU.**



MERCI

